



**Pronación por bajo tono muscular**

**Suave**

- Arco medial reducido pero visible
- Eversión ligera del talón
- Abducción ligera de la punta del pie
- Arco medial fácil de levantar

**Hot Dog™**  
Más sensorio

**PattiBob™**  
Con más apoyo

**Moderado**

- Arco medial significativamente reducido
- Eversión visible del talón
- Abducción visible de la punta del pie
- El arco medial se puede levantar con resistencia

**PollyWog™**

**JumpStart® Cricket™**  
Con más apoyo

**Fuerte**

- Ausencia de arco medial
- Eversión señalada del tobillo
- Abducción marcada de la punta del pie
- Arco medial difícil de levantar

**JumpStart® Leap Frog™**  
Intervención temprana ideal

**DAFO 4**



**Pronación o supinación por alto tono muscular**

**Suave**

*Pronación por alto tono muscular*

- Arco medial reducido
- Ligera eversión del talón
- Se resiste suavemente a la corrección

*Supinación por alto tono muscular*

- Arco medial ligeramente aumentado
- Inversión ligera del talón
- Se resiste suavemente a la corrección

**JumpStart® Leap Frog™**  
Intervención temprana ideal

**DAFO 4**

**Moderado**

*Pronación por alto tono muscular*

- Arco medial significativamente reducido
- Eversión del talón visible
- Se resiste activamente a la corrección

*Supinación por alto tono muscular*

- Arco medial claramente aumentado
- Inversión visible del talón
- Se resiste activamente a la corrección

**DAFO 4**  
Tira envolvente

**DAFO Tami 2**  
Tobillo libre

**Fuerte**

*Pronación por alto tono muscular*

- Ausencia de arco medial
- Eversión marcada del talón
- Resistencia fuerte y persistente a la corrección

*Supinación por alto tono muscular*

- Arco medial acentuado
- El pie parece estar fijo
- Resistencia fuerte y persistente a la corrección

**DAFO 3.5**  
Soporte flexible moderadamente

**DAFO FlexiSport**  
Para pacientes más grandes y activos



**Inconsistencia en la fase de balanceo**

**Suave**

- Pie y tobillo parecen firmes
- Puede controlar cuando se concentra
- Las caídas ocasionales aumentan cuando está cansado

**JumpStart® Bunny™**  
Intervención temprana ideal

**DAFO 4**  
Tira envolvente

**Moderado**

- Pie y tobillo no parecen firmes
- Puede mejorar el control cuando se concentra
- Tropezos frecuentes, especialmente sobre terreno irregular

**DAFO Tami 2**  
Tobillo libre

**DAFO 3.5**  
Soporte muy flexible

**Fuerte**

- Pie con dedos hacia abajo y talón invertido
- Muy poco control cuando se concentra
- El pie parece colgar
- Se cae o tropieza con frecuencia incluso en terreno nivelado

**DAFO 3.5**  
Soporte flexible moderadamente

**DAFO FlexiSport**  
Para pacientes más grandes y activos



**Flexión plantar excesiva - Camina sobre los dedos**

**Suave**

- Talón sin tocar el suelo de vez en cuando
- Puede controlar cuando se concentra
- Flexión plantar más pronunciada al correr
- Rango de dorsiflexión satisfactorio

**JumpStart® Bunny™**  
Intervención temprana ideal

**DAFO 4**  
Tira posterior

**Moderado**

- Talón sin tocar el suelo la mitad del tiempo
- Puede mejorar el caminar sobre los dedos, pero no eliminarlo
- Rango de dorsiflexión ligeramente limitado

**DAFO 3.5**  
Soporte flexible moderadamente

**DAFO FlexiSport**  
Para pacientes más grandes y activos

**Fuerte**

- Talón sin tocar el suelo siempre
- No puede variar la presentación
- Dorsiflexión limitada


**DAFO 9**  
Opción de estiramiento en la noche

**JumpStart® Kangaroo™**  
Intervención temprana ideal

**DAFO 3**

**DAFO Tami 2**  
Bloqueo de flexión plantar

**DAFO 2**

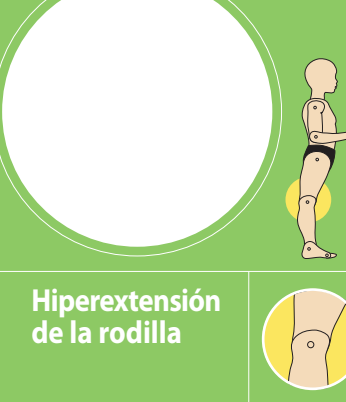

**Hiperextensión de la rodilla**

**Suave**

- Hiperextensión ocasional
- Suave y no marcada
- Puede controlar cuando se centra

**JumpStart® Bunny™**  
Intervención temprana ideal

**DAFO 4**  
Tira posterior

**DAFO Tami 2**  
Tobillo libre / Dorsiflexión asistida

**DAFO 3.5**  
Soporte flexible moderadamente

**Moderado**

- Hiperextensión frecuente
- Marcada pero sin fuerza
- Se puede reducir pero no eliminar cuando se centra

**DAFO 3.5**  
Soporte semirigido

**DAFO FlexiSport**  
Para pacientes más grandes y activos

**Fuerte**


- Hiperextensión constante
- Repentina y con fuerza
- Poco o ningún control voluntario

**JumpStart® Kangaroo™**  
Intervención temprana ideal

**DAFO 3**

**DAFO Tami 2**  
Bloqueo de flexión plantar

**DAFO 2**



**Se agacha o flexiona excesivamente las rodillas**

**Suave**

- Flexión de las rodillas ligera y ocasional
- Lo puede corregir fácilmente cuando se le indica
- A menudo asociado con fatiga
- Impacto ligero en la función diaria

**DAFO 3.5**  
Soporte semirigido para pacientes más pequeños

**DAFO FlexiSport**  
Para pacientes más grandes y activos

**Moderado**

- Flexión de la rodilla frecuente a constante
- Lo puede corregir algo cuando se le indica
- Siempre presente con fatiga
- Algunas limitaciones en la actividad diaria

**DAFO FA**  
para pacientes más pequeños

**DAFO FlexiSport**  
Para pacientes más grandes y activos

**Fuerte**

- Flexión de las rodillas constante y marcada
- Poco o ningún control voluntario
- Impacto significativo en la ambulación

**DAFO Turbo**

**DAFO Floor Reaction**



**Posicionamiento o ambulación limitada**

**Suave**

- Fácil de corregir y mantener manualmente
- Contornos típicos del pie con corrección

**Softy**

**DAFO 3.5**  
Soporte flexible moderadamente

**Moderado**

- Se puede corregir manualmente
- Características óseas y pronunciadas con corrección

**Softy**

**DAFO 8**

**Fuerte**

- Difícil de corregir y mantener manualmente
- Formas singulares, contornos anormales
- Corrección nada equilibrada

**Softy**

**DAFO Turbo**